



- 1 Placera Aerogen Solo ordentligt In i Aerogen Ultra.

OBS! Kammaren ska vara uppåt.



- 2 Fyll Aerogen Solo med medicin.



- 3 Anslut Aerogen Styrenhetskabeln till Aerogen Solo.

Om kompletterande syre krävs, anslut O2-slangen till Aerogen Ultra.



- 4 Tryck på på / av-knappen på Aerogen Styrenhet i 1 sekund för att välja 15 minuters läge.

För 30-minuters läge med Aerogen Pro Styrenhet, tryck och håll ner På / Av-knappen i 3 sekunder från läge Av.

För 6 timmars läge med Aerogen USB Controller tryck och håll på / av-knappen i 3 sekunder.

